

Walkease蹄伤贴特别采用乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 材料精心调制, 用户可以用腈基丙烯酸酯粘胶剂将它粘贴在动物蹄上。Walkease蹄伤贴价格实惠、使用方便, 用户无需具备特殊技巧与经验, 只需遵循本说明书指示。否则, 可能会导致粘贴失败。

Walkease蹄伤贴专用于修复轻度蹄伤, 它是修复愈合时间2-3周的小病, 如: 薄蹄底等的理想之选。愈合时间更长的重度蹄伤请另觅良方。

与众多蹄伤贴粘胶剂不同的是: Walkease粘胶剂需要蹄子和大气中的天然水分来激活。**请勿人为地使用热风或酒精来烘干蹄子。**寒冷天气下, 由于空气太干燥, Walkease粘胶剂的激活时间可能更长。(Walkease蹄伤贴涂上粘胶剂后, 建议对着涂胶面近距离吹几下, 然后再贴到蹄子上。)

Walkease粘胶剂开封前后必须储藏在冰箱里, 否则影响使用寿命。Walkease粘胶剂的最佳使用温度是室温或体温。从冰箱取出Walkease粘胶剂后, 建议将它揣进口袋带到使用现场。

使用步骤:

先处理受伤脚爪, 后为未受伤脚爪做粘贴Walkease蹄伤贴的准备。无论使用何种工具作粘贴准备, 请务必用Walkease锉刀进行表面处理, 因为只有Walkease锉刀能够处理出干净、平整的表面, 适合粘贴Walkease蹄伤贴。另外, 应保持Walkease锉刀干净。

Walkease蹄伤贴应小心拿放, 确保涂胶面干净、干燥。在蹄子上测试所需的Walkease蹄伤贴尺寸和形状, 然后选择能覆盖整个蹄壁的正确尺寸, 覆盖面积不宜过大。

使用Walkease粘胶剂时**请务必戴上手套**。在Walkease蹄伤贴上涂少量粘胶剂(最多2ml), 不能过多, 否则可能会导致粘贴失败。用力将涂胶的Walkease蹄伤贴按到蹄子上, 持续按压10秒(冷天下需要更久)后, 可感到Walkease蹄伤贴稳固。立即放下蹄子, 动物便会用其体重帮助Walkease蹄伤贴进一步稳固。切记在粘胶剂完全固化前, 必须迅速放下蹄子, 让动物施加体重, 否则Walkease蹄伤贴无法稳固。

在动物体重压力下, 粘胶剂会迅速凝固, 挤出多余胶水, 使Walkease蹄伤贴紧紧贴合在蹄子表面。只有这样, Walkease蹄伤贴才能稳固贴合。在寒冷天气下, 粘合过程更久, 请让动物戴着Walkease蹄伤贴站立更久再放开。

一般来说, Walkease蹄伤贴不需要人为去除, 2-3周后会自动脱落。

如需购买更多Walkease蹄伤贴和粘胶剂, 请联系Shoof经销商。

图1 按要求处理受伤脚爪。

图2 用锉刀为相邻脚爪做好涂胶的准备。

图3 在Walkease蹄伤贴上涂抹少量粘胶剂。

图4 用力将Walkease蹄伤贴按到未受伤脚爪上, 使其盖住蹄壁。

图5 立即放下蹄子, 让母牛在Walkease蹄伤贴上施加体重。

注: フロントページ上のチャートから、確認して下さいにブロックを押して時間を作ります。

